

# UPGUARD3000

**Le Support ergonomique pour le cou d'IMPACTO prévient l'extension extrême a fin de réduire la douleur au cou, la fatigue et les blessures aux travailleurs qui doivent travail leur au-dessus de leur tête de longues périodes.**

- ✓ **Modèle léger**
- ✓ **Mousse polyuréthane**
- ✓ **Une grandeur pour tous**
- ✓ **Courroies ajustables ignifuges**
- ✓ **Avec les grandes agrafes pour attacher à la Taille**
- ✓ **Dessiné et approuvé par un docteur**



Le Système de Support du Cou UPGUARD contribue à préserver l'intégrité anatomique du cou tout en faisant des mouvements d'extension soutenue ou répétitive. Le système UPGUARD via son attachement bande, repose sur la partie supérieure du thorax et approche le cou



Sans l'UPGUARD



Avec l'UPGUARD


quand la tête est prolongée, ou inclinée vers l'arrière. Le support est un rappel de restreindre le mouvement plutôt que de bloquer complètement le mouvement. Avec le support reposant sur le haut du dos, la gamme d'extension du mouvement est limitée.

Les études de Rayon-X ont démontré ce qui se passe au sein de nombreuses structures cervicales avec l'aide du support ergonomique UPGUARD.



## **Idéal pour beaucoup des métiers:**

- ✓ **Mécanique**
- ✓ **Forestière**
- ✓ **Painting**
- ✓ **Installation de Gyproc**
- ✓ **Plombiers**
- ✓ **Carpentier**
- ✓ **Electricien**
- ✓ **Opérateur de chariot élévateur**
- ✓ **Assemblage**
- ✓ **Équipe de service**
- ✓ **Lavage de fenêtres**
- ✓ **Ligne aérien**
- ✓ **Maintenance d'automobiles**

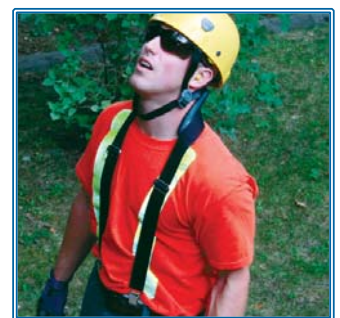

Innovative Protection

[www.impacto.ca](http://www.impacto.ca)

ISO 9001:2008

  
**IMPACTO®**  
Protective Products Inc.



PO Box 524, Belleville, ON  
E-mail: [impacto@impacto.ca](mailto:impacto@impacto.ca)  
N. America 888-232-0031  
Free phone UK 0800 0280 243  
Tel 613-966-0062 Fax 613-966-0067

PATENT PENDING

Distributeur,



## Équipement de Soutien Cervical UPGUARD3000 (brevet en instance) Foire aux questions

### **\*Qui doit éviter de porter l'équipement de soutien cervical UPGUARD?**

Les personnes qui souffrent de polyarthrite rhumatoïde grave, spondylarthrite ankylosante, syndrome urétrosynovial, rhumatisme psoriasique, trisomie 21, arthrite entéropathique ou tout état qui prédispose une personne à l'instabilité dans la partie supérieure du cou.

Pour toute question, consulter un médecin avant l'utilisation.

### **\*Avertissements**

S'il existe un risque de flamme ou de chaleur, on doit utiliser le revêtement anti-transpiration jetable C401. S'il n'y a aucun risque de flamme nue ou de chaleur, nous recommandons notre revêtement anti-transpiration en flanelle C403.

Nota : Le revêtement anti-transpiration ignifuge jetable C401 est conforme aux normes NFPA-701 et ONGC 4.2. On ne peut pas laver ce revêtement jetable et il doit être jeté après chaque utilisation.

### **Pourquoi devrais-je porter l'équipement de soutien cervical UPGUARD?**

Si vous souffrez de douleurs cervicales ou d'un cou raide » en regardant vers le haut, le nouveau produit de soutien cervical » peut vous soulager! Il aide à empêcher l'apparition de tension musculaire due à la fatigue.

### **Quelles sont les propriétés de l'équipement de soutien cervical UPGUARD?**

L'UPGUARD3000 a été conçu par un médecin pour faciliter l'extension du cou vers le haut pendant de longues périodes.

L'UPGUARD3000 aide à préserver l'intégrité anatomique du cou lors de mouvements d'extension soutenus ou répétitifs. Le nouvel équipement de soutien cervical UPGUARD3000, au moyen de sa sangle d'attache, repose sur la partie supérieure du thorax (haut du dos) et se rapproche du cou lorsque la tête est en extension ou inclinée vers l'arrière. L'équipement de soutien sert à se rappeler de limiter le mouvement plutôt que de le bloquer complètement. L'équipement de soutien étant appuyé sur le haut du dos, la portée d'extension du mouvement est limitée.

### **Qui doit porter l'UPGUARD3000?**

Les travailleurs qui adoptent des positions de travail soutenues ou anormales, en particulier ceux qui doivent garder le cou en extension pendant de longues périodes.

### **Quels métiers peuvent tirer profit de l'UPGUARD?**

De nombreux métiers peuvent tirer profit de l'équipement de soutien cervical UPGUARD3000, y compris les ouvriers des services publics, préposés à l'entretien, nettoyeurs, forestiers, installateurs de cloisons sèches, peintres, nettoyeurs de vitres, mécaniciens, plombiers, électriciens et bien plus. Bon nombre de sportifs peuvent également trouver l'équipement de soutien cervical très utile. Les grimpeurs et marins sont d'avis qu'il aide à soulager la tension du cou.

### **Comment porte-t-on l'équipement de soutien cervical UPGUARD?**

Placez tout simplement l'équipement de soutien cervical sur vos épaules par-dessus la partie supérieure du thorax (haut du dos) et fixez les deux attaches à votre ceinture ou vos pantalons. Les ajusteurs coulissants mobiles doivent fournir un ajustement libre qui ne tire pas sur les épaules.

De nombreux travailleurs sont d'avis que déplacer les ajusteurs vers les hanches procure une meilleure stabilité.

### **Comment nettoie-t-on l'UPGUARD?**

On doit nettoyer l'équipement de soutien cervical avec un savon doux et de l'eau. On doit faire sécher les sangles complètement avant de réutiliser l'équipement de soutien.